

MODE D'EMPLOI INSTRUCTIONS DE CONDUITE SÉCURITÉ

Lisez cette documentation pour une utilisation optimale
de votre Eloflex en toute simplicité.

ELOFLEX K

DOSSIER INCLINABLE



ELOFLEX

MERCI D'AVOIR CHOISI ELOFLEX

Nous vous remercions d'avoir choisi un fauteuil Eloflex. Cela signifie beaucoup pour nous car nous avons pour objectif de simplifier la vie des personnes ayant des problèmes de mobilité. Nous espérons que votre Eloflex vous donnera entière satisfaction.

Ce manuel contient des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien. Nous vous invitons à lire cette documentation avant d'utiliser votre Eloflex. Nous vous suggérons également de tester votre Eloflex sur une surface lisse avec suffisamment d'espace autour de vous avant de l'utiliser dans d'autres conditions.

Le fauteuil roulant Eloflex est conçu pour différents types d'utilisateurs. Il est important de vérifier au préalable via votre revendeur et (ou) un médecin rééducateur spécialisé si Eloflex est adapté à vos besoins. Eloflex décline toute responsabilité si son fauteuil n'était pas adapté à vos besoins.

Un Eloflex sera principalement utilisé dans sa configuration standard. Si le fauteuil roulant électrique devait être adapté ou modifié de quelque façon, subir de mauvaises manipulations ou un mauvais entretien, la garantie ou la reprise ne serait pas valable.

**Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur avec votre Eloflex.
Conduisez prudemment !**



SOMMAIRE

Utilisation	3
Dépliage - Pliage	4
Installation de la manette	5
Instructions de charge	5
Manette de commande	6
Assise réglages	7
Accoudoirs réglages	8
Conduite manuelle	8
Système anti-bascule	9
Ajuster le dossier	9
Repose-pieds	9
Transport et rangement	10
Instructions de conduite	11
Consignes de sécurité	14
Caractéristiques techniques	17
Contact	17

UTILISATION

Classification et utilisation

Les fauteuils roulants Eloflex ont été conçus pour les personnes ayant des difficultés à marcher ou ne pouvant pas du tout marcher, mais dotées de la vue et, physiquement et mentalement, capables de conduire un fauteuil roulant électrique.

Les fauteuils Eloflex sont suffisamment compacts et maniables pour être utilisés autant en intérieur qu'en extérieur. Dans le chapitre "Caractéristiques techniques" vous trouverez des informations sur la vitesse, le rayon de braquage, la gamme, l'autonomie, le poids maximum de l'utilisateur, etc. Lisez également attentivement le chapitre «Consignes de sécurité».

Les fauteuils roulants Eloflex sont testés et approuvés selon la norme EN12184: 2014 - classe B (utilisation intérieure et extérieure). Eloflex est également approuvé selon la norme ISO-7176, IEC60601 et les batteries sont approuvées selon la norme UN38.3. Les fauteuils roulants électriques Eloflex répondent aux exigences applicables du MDR 2017/745.

L'évaluation de la conformité de classe 1 / le marquage CE a été délivré conformément à l'annexe VIII chapitre III du RIM 2017/745. Procédure d'évaluation de la conformité : Annexe II et Annexe III du RDM 2017/745. Le marquage CE sera annulé si vous utilisez des pièces de rechange ou des accessoires non approuvés pour ce produit.

Utilisateurs

Le but d'un fauteuil roulant électrique Eloflex est de compenser une blessure ou un handicap. Il est recommandé dans les cas suivants :

- Si l'utilisateur a l'incapacité, ou la capacité très restreinte de marcher, rendant difficile ses déplacements à domicile.
- S'il y a besoin, de sortir du domicile, de se rendre dans des lieux publics ou effectuer des tâches du quotidien.
- Lorsque l'utilisateur éprouve des difficultés à exercer une profession ou des activités en raison de son handicap.

Il est conseillé d'utiliser les fauteuils roulants électriques Eloflex, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Accessoires

A réception de votre fauteuil, vous trouverez un chargeur et un sac avec quelques outils pour l'entretien du fauteuil dans le sacochette de rangement sous le siège.

Convivialité

Utilisez uniquement le fauteuil roulant électrique Eloflex en parfait état de fonctionnement pour ne pas mettre en danger qui que ce soit. Voici une liste exhaustive des situations qui peuvent affecter l'utilisation de votre fauteuil roulant électrique.

- N'utilisez pas le fauteuil roulant électrique si les batteries sont défectueuses ou abîmées.
- N'utilisez pas le fauteuil roulant électrique si les moteurs fonctionnent de manière erratique ou font un bruit anormal.
- N'utilisez pas le fauteuil roulant électrique si les freins ne semblent pas fonctionner normalement.
- Si vous constatez que la ceinture de sécurité, l'accoudoir, le siège, le dossier, le joystick ou à toute autre partie du fauteuil est abîmée, contactez votre centre d'assistance ou votre revendeur.
- Si vous remarquez des dommages au système électrique (câbles, batteries, chargeurs) contactez votre centre de service ou votre revendeur.

Garantie

Vous disposez d'une garantie de deux ans sur votre fauteuil roulant électrique Eloflex (conditions de garantie conformes aux lois applicables sur les dispositifs médicaux en vigueur). Conditions de garantie détaillées sur [eloflex](#) **Pensez à bien garder le carton d'emballage d'origine pendant toute la durée de garantie.**

Durée de vie

La durée de vie moyenne d'un Eloflex est d'environ 5 ans. Cette durée peut évoluer suivant la façon dont est utilisé Eloflex. Elle peut-être beaucoup plus longue si son utilisation est conforme aux recommandations de cette notice.

Sécurité et risques

LISEZ LES INSTRUCTIONS DE CONDUITE ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ PAGE 11 AVANT D'UTILISER VOTRE FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE ELOFLEX.



DÉPLIAGE

Etape 1

Posez le fauteuil plié sur le sol comme indiqué à droite. Tenez avec une main le coussin du siège. Saisissez avec l'autre main le dossier et tirez vers le haut pour déplier le fauteuil.

1



Etape 2

TRÈS IMPORTANT : fermez le crochet de verrouillage.

2



IMPORTANT

Il est très important de fermer le crochet de verrouillage avant l'utilisation du fauteuil.

PLIAGE

Etape 1

Ouvrez le crochet de verrouillage comme sur les photos de droite.

1



2

Etape 2

Mettez une main sur l'avant du coussin de siège. Saisir le bord supérieur du dossier avec votre autre main et le plier vers l'avant. Positionnez le fauteuil comme ci-contre.



INSTALLATION DE LA MANETTE

Etape 1

Montez la manette dans le support sous l'accoudoir et serrez la vis.



Etape 2

Assembler délicatement les connecteurs de câble et tournez-les doucement jusqu'à ce que les broches entrent dans les trous et que les rainures des deux connecteurs s'alignent. Vissez ensuite ensemble les manchons de chaque connecteur.



IMPORTANT Veillez à ce que les broches du connecteur ne soient pas endommagées ou pliées.

INSTRUCTIONS DE CHARGE

Pour charger

Commencez par éteindre votre Eloflex (tous les voyants de la manette doivent être éteints). Branchez le chargeur dans la prise à l'avant de la manette. Assurez-vous que les contacts soient bien alignés entre eux. Raccordez le cordon d'alimentation du chargeur à une prise murale électrique.

Le chargement est indiqué par une lampe sur le chargeur. La lumière rouge signifie que le chargement est en cours. Après environ 3 heures, les batteries sont chargées à 90%. La lumière devient verte. Le fauteuil peut être utilisé à nouveau. Après environ 5 à 8 heures les batteries sont complètement chargées et le voyant devient vert.

Si vous constatez que le chargeur est chaud pendant cette opération ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal.

Pour conserver une durée de vie maximale de vos batteries, le chargement doit durer environ 5 heures lorsque la barre d'indicateur de charge de la manette est en dessous de la moitié (lorsqu'un voyant jaune ou rouge s'allume). Nous vous recommandons également de débrancher le chargeur lorsque les batteries sont pleines.



IMPORTANT

Ne jamais brancher le chargeur directement à la batterie.

Le chargement des batteries peut être effectué jusqu'à -10 degrés. Lors du chargement à basses températures les batteries ne sont pas complètement chargées. Si votre Eloflex est utilisé à des températures inférieures le kilométrage peut en être affecté. Par exemple à -10 degrés le kilométrage peut diminuer jusqu'à 50%.


Le chargement est indiqué par une lumière rouge sur le chargeur. Ne pas tenir compte de celle indiquée sur la manette. Si lors de la charge la lumière reste verte, c'est qu'il y a une anomalie de charge.

Toute mauvaise manipulation ne sera pas couverte par la garantie.


MANETTE DE COMMANDE



Manette :
contrôle la vitesse et la direction du fauteuil.

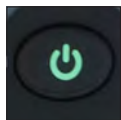

Allumer et éteindre :
appuyez pour allumer et éteindre votre Eloflex.

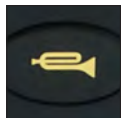

Klaxon :
Appuyez pour prévenir.



Augmenter la vitesse :
appuyez pour augmenter la vitesse du fauteuil.



Réduire la vitesse :
appuyez pour réduire la vitesse du fauteuil.



Lumière : appuyez pour allumer ou éteindre

Ecran LCD



- Zone affichage d'état
- Vitesse de conduite
- Niveau de batterie
- Kilomètres parcourus
- Fonctions

Niveau de batterie :
indique le niveau de charge. Lorsque les batteries sont pleines toutes les barres sont blanches. Mettez en charge lorsqu'il ne reste que 3 barres blanches.

Indicateur de vitesse :
toutes les lumières allumées = vitesse maximale.

MANETTE DE COMMANDE


Modifier les paramètres

Vous pouvez modifier les paramètres du fauteuil tels que la langue, le klaxon ou les unités de volume et de mesure.

1. Pour accéder aux paramètres, appuyez sur le bouton multifonction droit. Une liste avec options à choix multiples s'ouvrira alors.

2. Dans la liste à choix multiples, faites défiler de haut en bas avec le bouton de vitesse.

3. Sélectionnez la fonction avec la touche multifonction droite "Enter" ou retournez en arrière avec la touche multifonction gauche "Return".

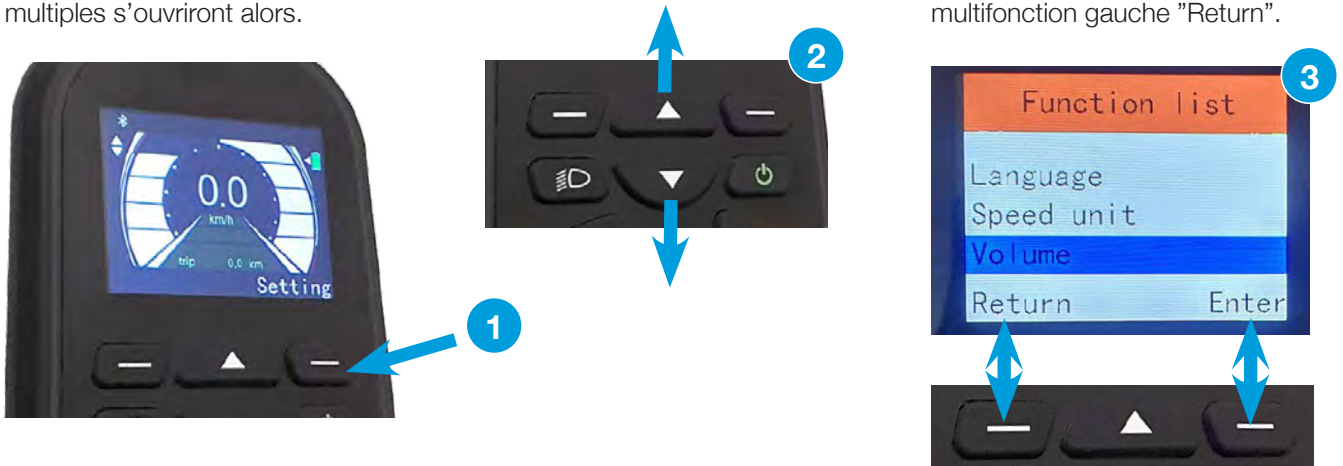


ASSISE - MODIFIER LA LARGEUR

Pour régler la largeur du siège, commencez par desserrer la vis sous le siège et régler la largeur en tirant l'accoudoir vers l'extérieur.



ASSISE - CHANGER LA HAUTEUR

Pour modifier la hauteur du siège, il vous suffit d'appuyer sur les flèches "haut" et "bas" de la manette lorsqu'elle est allumée. Avec le bouton "flèche vers le haut", vous soulevez le siège, avec le bouton "flèche vers le bas" vous abaissez le siège. Continuez à maintenir le bouton enfoncé jusqu'à la hauteur souhaitée.

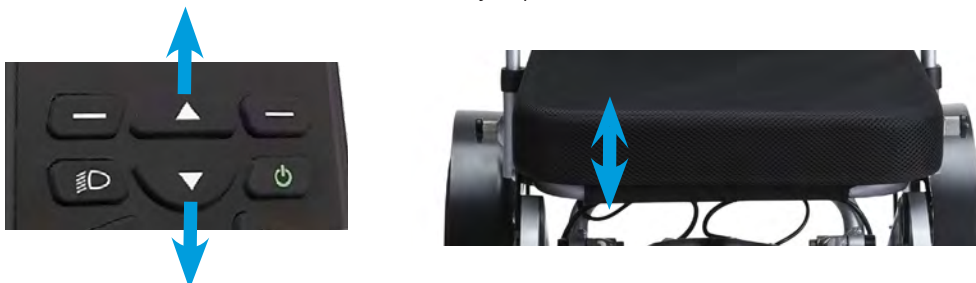




IMPORTANT
Ne pas changer la hauteur de l'assise en conduisant.

ACCOUDOIRS - AJUSTER LA HAUTEUR

Pour régler la hauteur des accoudoirs, tirez la vis sur le côté de l'accoudoir vers l'extérieur, puis montez/abaissez l'accoudoir à la hauteur désirée.

Vous pouvez également desserrer complètement l'accoudoir si besoin pour faciliter l'entrée et la sortie du fauteuil.

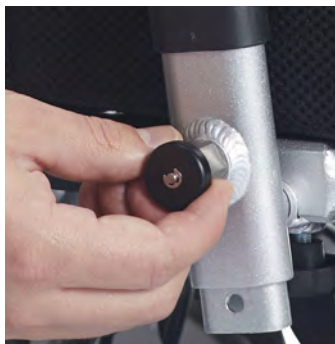

ACCOUDOIRS - AJUSTER LA LONGUEUR


Pour régler la longueur de l'accoudoir, appuyez sur le bouton sous l'accoudoir, puis faites glisser l'accoudoir horizontalement vers la position souhaitée.



CONDUITE MANUELLE

Si vous souhaitez faire rouler le fauteuil manuellement sans les moteurs, éteignez d'abord le fauteuil. Puis poussez vers l'avant les deux leviers rouges des moteurs (voir photo) pour déconnecter les freins magnétiques (position de débrayage). Dans cette position, le fauteuil peut être poussé manuellement.

A noter : si vous utilisez le fauteuil en mode électrique les leviers doivent être en position connecté (embrayage).

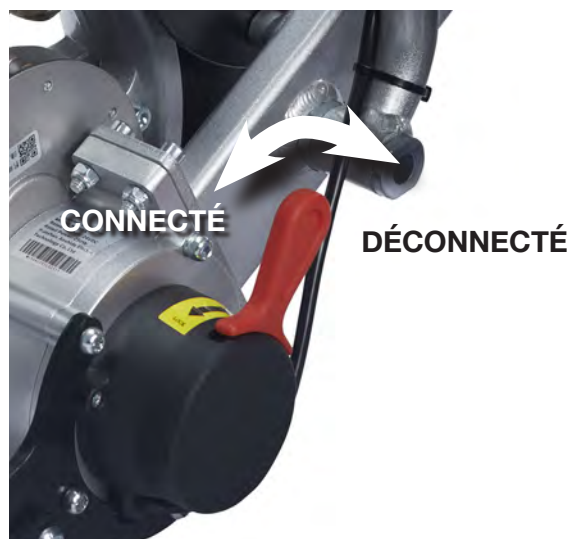

IMPORTANT

Pour votre sécurité, si vous utilisez le fauteuil sans l'aide de personne, ne déconnectez pas les leviers, vous n'auriez plus de frein.

SYSTÈME ANTI-BASCULE

Les dispositifs anti-basculement ont deux positions. La première lorsque le fauteuil roule et la deuxième lorsque le fauteuil est plié et mis en position verticale. Ils se replient automatiquement lorsque vous placez la chaise à la verticale dans la position repliée. Pour une sécurité optimale, les dispositifs anti-basculement doivent toujours être en position déployée avec le support roue en arrière pendant la conduite.



AJUSTER LE DOSSIER

Ajustez l'inclinaison

Vous pouvez régler l'inclinaison du dossier entre 2 et 22 degrés pour une position assise optimale.

Faites comme ceci :
Poussez les deux leviers verticalement vers le bas.
Maintenez les deux leviers en position enfoncée tout en poussant le dossier vers l'arrière.
Relâchez les leviers lorsque le dossier a l'inclinaison souhaitée.



Pour remettre le dossier dans sa position d'origine, maintenez les leviers vers le bas tout en soulageant le poids contre le dossier. Le dossier revient alors à sa position de base.

REPOSE-PIEDS

Pour faciliter l'entrée et la sortie, le repose-pieds peut être replié sous l'assise comme indiqué ci-dessous.




Ajuster le repose-pieds

Dévissez la vis et ajustez à la hauteur souhaitée.



TRANSPORT ET RANGEMENT

- Pour soulever le fauteuil, il est recommandé d'abord de le plier, puis de le mettre debout.
Vous trouverez des conseils sur les façons de charger l'Eloflex dans une voiture sur www.eloflex.fr
- Le fauteuil plié peut être rangé dans le coffre d'une voiture ou dans un placard.
- Si vous n'utilisez pas votre fauteuil pendant un certain temps, rechargez les batteries avant de les retirer.
- **Le fauteuil doit être stocké à l'intérieur dans un endroit sec, ventilé et hors-gel** (entre 0 et 30 degrés).
- Si vous devez prendre l'avion avec votre fauteuil Eloflex, nous vous recommandons de lire les informations sur notre site conformément aux réglementations de l'IATA www.eloflex.fr
- Lors du transport dans un véhicule public, attachez-le par les points de fixation indiqués sur la photo à droite. **Eloflex n'est pas un siège auto.** Nous recommandons toujours à l'utilisateur d'utiliser les sièges de la voiture.

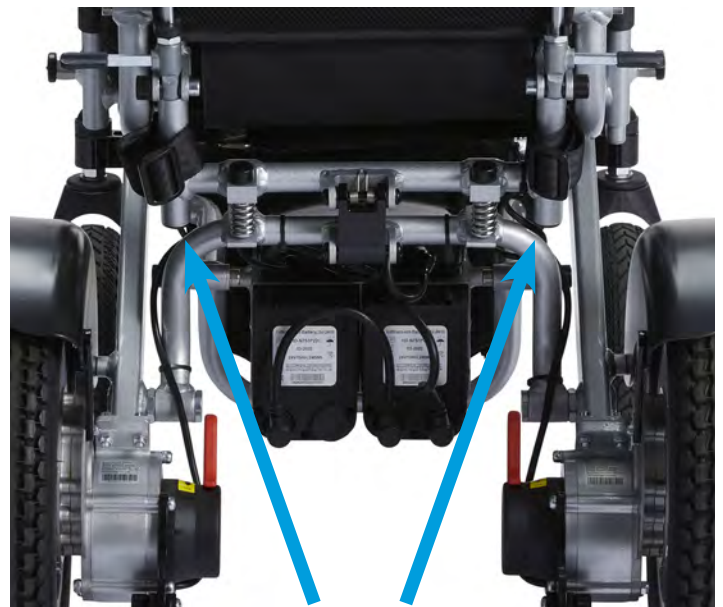

**Retrouvez tous nos accessoires chez votre revendeur
ou sur : eloflex.fr**

CONDUITE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORS DE LA CONDUITE

Il existe des risques de blessure ou de chute pour les personnes en fauteuil roulant.

- Ne pas dépasser la pente maximale autorisée.
- Toujours utiliser le dispositif anti-bascule lorsque vous roulez avec Eloflex.
- La conduite en pente doit toujours être en vitesse réduite.
- Évitez les surfaces extrêmement glissantes.
- Ne jamais tenter de monter ou descendre des escaliers avec votre fauteuil électrique.
- Ne jamais franchir des obstacles plus élevés que la hauteur maximale recommandée.
- Évitez les mouvements rapides ou saccadés avec la manette et les changements brusques de direction pendant la conduite.

Risque d'être bloqué en zones éloignées.

- Un utilisateur avec une mobilité très limitée ne doit pas tenter de voyager seul.

Risque de blessure aux pieds si ceux-ci glissent sous le repose-pieds lors de la conduite.

- Placez toujours vos pieds au milieu du repose-pieds (au centre de la palette) en conduisant.

Risque de blessure si vous passez dans des endroits trop étroits.

- Conduisez dans des passages étroits à vitesse réduite et avec la plus grande attention.

Il y a un risque de chute si le système anti-bascule est mis trop haut, est endommagé ou est monté autrement que l'installation standard.

- Le dispositif anti-bascule doit toujours être monté lorsque le fauteuil roulant est utilisé.
- Le dispositif anti-bascule ne fonctionne que sur la terre ferme. Sur un sol mou comme l'herbe et la neige il perd de son efficacité. Par conséquent, conduire avec une grande prudence sur sols instables.



Notez que ces symboles sont très importants.
Si les instructions ne sont pas suivies, il y a un risque
d'accident ou de dégâts sur votre Eloflex.

INSTRUCTIONS DE CONDUITE

Lire



L'utilisateur doit lire les consignes de sécurité et de conduite avant l'utilisation du fauteuil Eloflex.

Pratique




- Pour une parfaite **pratique** commencez par vous exercer dans un lieu spacieux, plat, de préférence à l'extérieur, avant d'utiliser votre fauteuil roulant électrique dans les magasins, les restaurants ou autres.
- **Avancez** en déplaçant la manette vers l'avant lentement.
- **Arrêt** en libérant la manette.

Marche arrière




- Vous pouvez effectuer une **marche arrière** en tirant lentement la manette vers l'arrière. Pour arrêter, relâchez la manette. Regardez toujours derrière vous avant de reculer afin de ne rien heurter.

Tourner

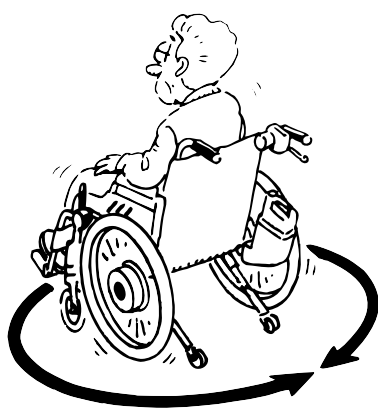


- **Tournez** en déplaçant la manette doucement sur le côté. Faites attention que rien ne se trouve sur votre droite ou votre gauche lorsque vous tournez.

Virage

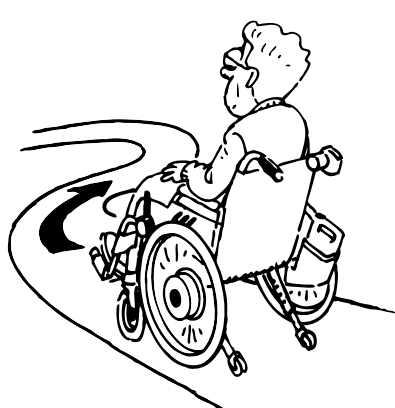

- **Pour tourner**, déplacez doucement la manette d'un côté à l'autre en suivant la direction dans laquelle vous voulez tourner. Réduisez toujours votre vitesse dans les virages.


Obstacles

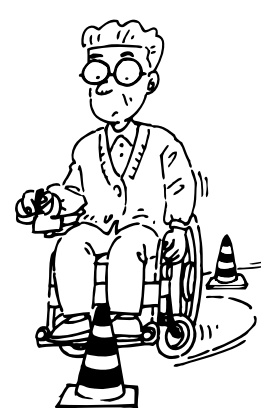

- Pour éviter un obstacle, déplacez doucement la manette de gauche à droite (ou de droite à gauche). Rappelez-vous de réduire votre vitesse à l'approche d'un obstacle.


INSTRUCTIONS DE CONDUITE

Accélérer

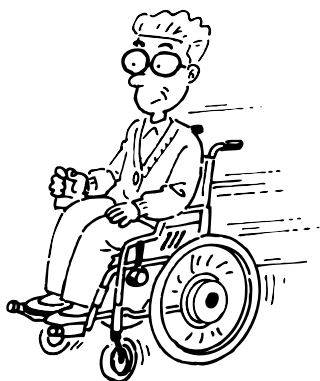


- Pour **accélérer** poussez la manette vers l'avant. Pensez à réduire la vitesse chaque fois que vous vous sentez incertain, que vous devez tourner ou que vous vous approchez d'un obstacle.

Marche

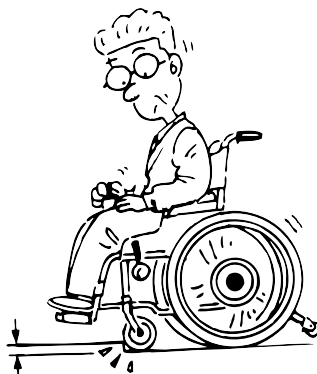


- Pour **passer une marche** conduisez lentement et assurez vous que les roues soient bien dans le sens de la marche. Puis poussez la manette vers l'avant lentement pendant que vous vous penchez doucement vers l'arrière. La marche (ou le trottoir) ne doit pas dépasser 6 cm de haut.

Conduite en pente

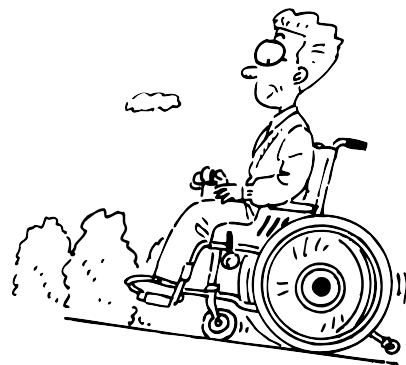


- Pour **conduire en pente** restez en position droite. Évitez de faire des virages si possible. Penchez-vous légèrement vers l'avant en pente ou vers l'arrière en descente afin de maintenir la plus grande stabilité. Conduisez toujours lentement en pente. Nous recommandons d'éviter les surfaces inclinées de plus de 9 degrés.

Prendre l'ascenseur

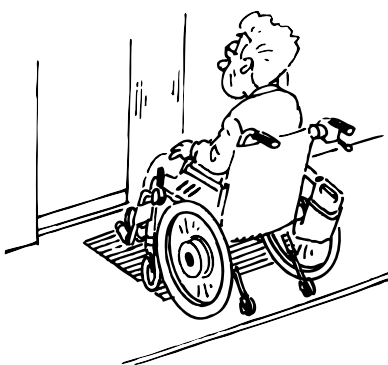


- **Avant de monter dans un ascenseur** vérifiez la largeur de la porte et sa vitesse de fermeture. Gardez à l'esprit que vous pouvez être amené à faire marche arrière ou demi-tour dans l'ascenseur.

Conduite sur route

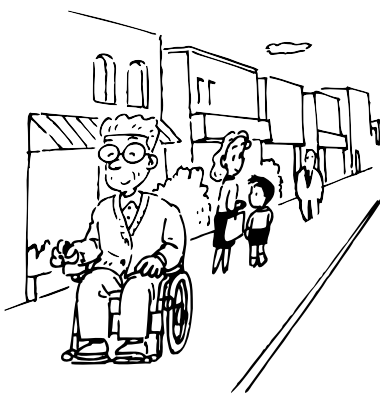

- **Conduisez principalement** sur les trottoirs, les allées ou les pistes cyclables.

Passages cloutés

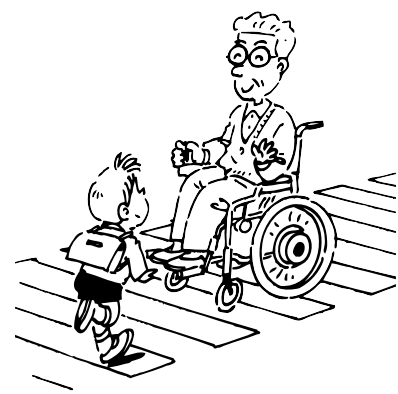

- Faites attention aux voitures. Pour traverser utilisez les **passages cloutés**. Descendez du trottoir par la partie biseautée s'il y en a une. Évitez les trottoirs de plus de 6 cm.

SÉCURITÉ

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Il existe des risques de blessures si le fauteuil roulant est utilisé à des fins autres que celles décrites dans le présent document.

- Utiliser le fauteuil roulant électrique seulement selon ce manuel (voir ci-dessus, chapitre "Instructions de conduite»)

Il existe des risques de blessures si le fauteuil roulant est utilisé par un utilisateur aux facultés très affaiblies.

- Ne pas utiliser le fauteuil roulant lorsque votre capacité de conduire est altérée en raison, par exemple, de la maladie, la drogue ou l'alcool.

Il existe des risques de blessures si le fauteuil roulant est accidentellement mis en route.

- Eteindre le fauteuil roulant avant l'entrée ou la sortie, ou si quelque chose est susceptible de heurter la manette de contrôle.
- Lorsque les moteurs sont débrayés les freins ne fonctionnent pas. Par conséquent, le fauteuil ne peut rouler que sur des surfaces planes, jamais en pente. Ne restez jamais sur le fauteuil roulant ou à proximité en pente avec des moteurs découplés.

Il existe des risques de blessures si le fauteuil roulant est débranché accidentellement.

- Relâchez la manette lors du freinage d'urgence. Le fauteuil roulant s'arrêtera automatiquement.

Il existe des risques de blessures si l'on tombe du fauteuil roulant.

- Ne glissez pas vers l'avant. Ne vous pliez pas en deux. Ne vous penchez pas au-dessus du dossier, par exemple pour atteindre quelque chose.
- Bouclez toujours la ceinture de sécurité avant chaque départ.

- Si vous souhaitez vous installer dans un autre siège, mettez les deux fauteuils le plus près possibles l'un de l'autre.

Il existe des risques de blessures si le poids maximal autorisé est dépassé.

- Respecter le poids maximal autorisé (voir chapitre "Caractéristiques techniques" au dos de ce document).
- Ne jamais utiliser le fauteuil roulant pour le transport de plus d'une personne à la fois.

Il y a risque de blessures corporelles et dommages du fauteuil roulant si le crochet de verrouillage n'est pas enclenché correctement lors de l'utilisation du fauteuil motorisé.

- Si crochet de verrouillage n'est pas enclenché correctement, le fauteuil peut soudainement se replier lorsqu'il est utilisé et entraîner votre chute.
- Assurez-vous que le crochet de verrouillage est dans la bonne position avant utilisation du fauteuil.

Il y a un risque de blessures et d'écrasements pendant le pliage du fauteuil roulant.

- Toujours plier le fauteuil comme décrit dans le manuel.
- Veillez à ce que personne ne soit piégé lors du pliage ou du dépliage.

Il y a risque de blessures corporelles et dommages du fauteuil roulant en cas d'utilisation en zones humides.


- Le fauteuil roulant ne doit pas être utilisé lors de la douche.
- Le fauteuil roulant ne doit pas être utilisé pour la baignade.



Notez que ces symboles sont très importants.
Si les instructions ne sont pas suivies, il y a un risque d'accident ou de dégâts sur votre Eloflex.

SÉCURITÉ


Traverser une voie ferrée

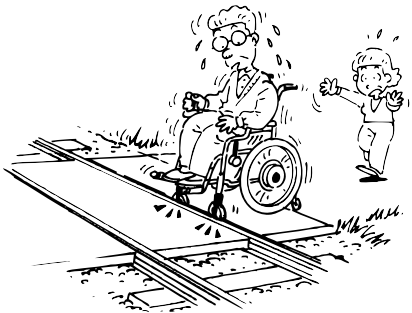

- **Pour traverser les voies de chemin de fer** mettez-vous toujours droit, jamais de biais. Ne traversez jamais une voie ferrée seul, faites vous accompagner.




Pente chute

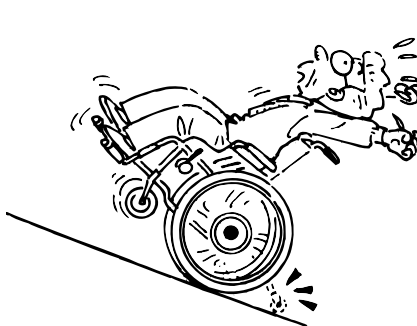

- Soyez prudent si vous conduisez sur une pente raide (plus de 9 degrés) le fauteuil risque de se retourner.



Marches hautes

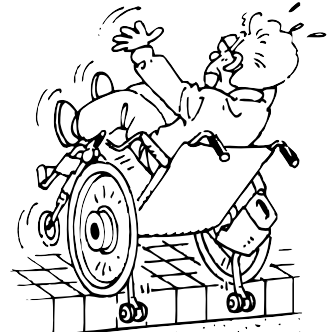

- Soyez prudent lors du passage de marches hautes. Nous vous déconseillons les obstacles supérieurs à 6 cm.




Transfert



- Nous recommandons de vous faire aider lors du transfert de votre Eloflex vers un autre support. Tout d'abord coupez l'alimentation. Soulevez toujours l'accoudoir et le repose-pieds avant de sortir ou entrer dans votre fauteuil.




Faire soi-même

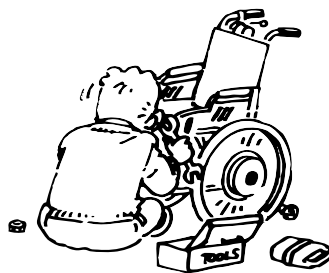

- **Ne jamais essayer de réparer** votre fauteuil roulant électrique défectueux ou **d'apporter des modifications par vous même.** Contacter Eloflex.



Ce n'est pas un jouet

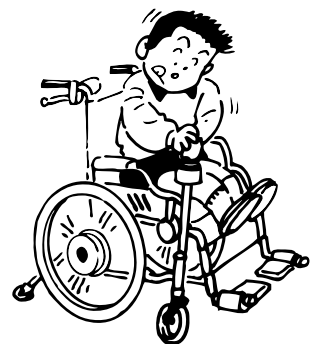


- Ne jamais laisser les enfants s'asseoir ou utiliser votre Eloflex.



SÉCURITÉ


Nettoyage

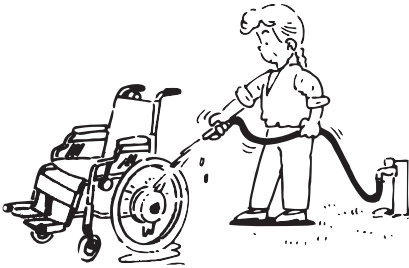

- Ne nettoyez jamais votre Eloflex à grande eau. Nettoyez le uniquement avec un chiffon humide. Notez qu'un Eloflex ne doit jamais être lubrifié.




Attention à la chaleur

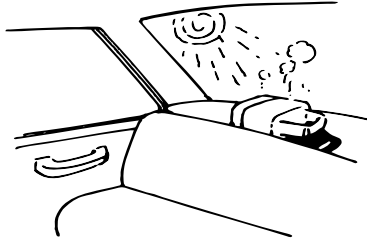

- Ne laissez jamais votre Eloflex en plein soleil ou près d'une source de chaleur cela pourrait endommager les batteries. Ne pas rester près d'un feu avec votre Eloflex.




Rangement

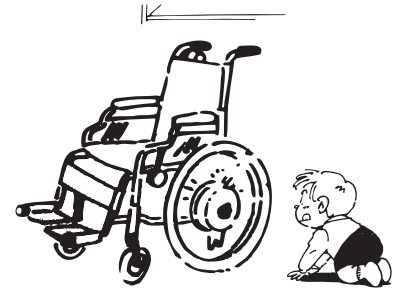

- Gardez votre Eloflex hors de la portée des enfants lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Rangez-le toujours dans un endroit sec et ventilé.



Chargeur

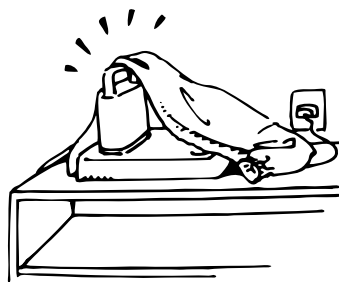

- Le chargeur ne doit jamais être recouvert lorsqu'il est en charge. Il risque de chauffer et de causer un accident ou de blesser quelqu'un.



Batterie



- Ne laissez jamais les batteries en plein soleil ou dans un endroit dont la température est inférieure à zéro. Elles doivent être stockées dans un endroit sec et ventilé.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ELOFLEX F
Poids sans batteries	28,5 kg
Poids avec batteries	32 kg
Vitesse	6,5 km/h
Autonomie	30 km
Moteurs	x 2 moteurs brushless haute puissance
Batteries	x 2 batteries Litium ION 10 AH / 24 V (240 Wh)
Puissance	2 x 250 Watt
Rayon de braquage	78 cm
Pente maximale	9 degrés
Roues	8" avant (gels) / 12" arrière (pneumatiques)
Pression pneus	2,5 kg (recommandé)
Hauteur du siège	47 - 52 cm
Largeur d'assise	36 - 44 cm (accoudoirs écartés)
Profondeur d'assise	36 cm
Poids utilisateur	Max 90 kg
Manette	A gauche, à droite ou sur le dossier*
Coussin	Amovible. Déhoussable. Lavable en machine
Dossier	Inclinable de 0 à 22°
Repose-pieds	Rabattable et réglable (4,5 cm plus haut)
Dimensions (cm)	89 cm (H) x 55 cm (L) x 100 cm (P)
Dimensions plié (cm)	75 cm (H) x 55 cm (L) x 36 cm (P)
Garantie	2 ans



* Fixation au dossier par attache tubulaire vendue comme accessoire

Contactez Eloflex

Vous avez des questions ou besoin d'aide ?

Contactez avant tout votre revendeur.

Si vous cherchez des informations consultez notre FAQ sur notre site internet www.eloflex.fr vous y trouverez certainement la réponse à votre question.

ELOFLEX

Tél. : 09 67 66 51 29 - Mail : info@eloflex.fr
www.eloflex.fr

© Copyright Eloflex - Ce document contient des informations protégées par le droit d'auteur et ne peut être partiellement ou totalement copié ou reproduit sans l'autorisation écrite d'Eloflex.

Eloflex se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ce produit.

Informations non contractuelles.