

ELOFLEX H2

INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUGSANVISNING
OHJEKIRJA
MANUALE DI ISTRUZIONI
HANDLEIDING VOOR GEBRUIK
GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
MANUEL DE L'UTILISATEUR



ELOFLEX

FRANÇAIS


BIENVENUE DANS VOTRE ELOFLEX

Nous vous remercions d'avoir choisi Eloflex comme fauteuil roulant électrique. Nous sommes ravis que vous ayez opté pour Eloflex, car notre mission est de simplifier la vie quotidienne et d'accroître la liberté des personnes à mobilité réduite. Nous espérons que votre Eloflex vous permettra de profiter de ces deux avantages.

L'utilisation de votre nouveau fauteuil roulant électrique doit être une expérience enrichissante. Ce manuel contient des informations cruciales sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien. Nous vous recommandons vivement de lire l'ensemble du document avant d'utiliser votre Eloflex pour la première fois. Il est également conseillé de s'entraîner à utiliser votre Eloflex dans un espace calme, ouvert et plat avant de s'aventurer dans d'autres environnements.

Nous sommes là pour vous aider à utiliser votre Eloflex. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter.

Bonne chance et beaucoup de plaisir avec votre Eloflex. Conduisez prudemment !

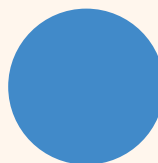

CONTENU

Utilisation prévue	3	Réglage du dossier / Soutien lombaire	12
Dépliage / Pliage	4	Mécanisme de verrouillage	13
Désassembler / Assemblage	5	Dispositif anti-basculement / Conduite manuelle	13
Chargement	6	Ceinture de sécurité / Transport et stockage	14
Installer le joystick / Rabattre le joystick	7	Conduite	15
Utilisation du joystick	8	Consignes de sécurité pour la conduite / Sécurité	16
Fonctions supplémentaires	9	Consignes de sécurité générales	17
Repose-pieds	10	Spécifications techniques	18
Accoudoirs / Dossier	11		

UTILISATION PRÉVUE

Classification et utilisation prévue

Les fauteuils roulants électriques Eloflex ont été conçus pour les personnes qui ont des difficultés à marcher ou qui ne peuvent pas marcher du tout, mais qui ont la vision et les capacités physiques et mentales nécessaires pour contrôler un fauteuil roulant électrique.

Le fauteuil roulant électrique Eloflex est suffisamment compact et flexible pour être utilisé à l'intérieur, mais il convient également pour une utilisation à l'extérieur. Le chapitre ""Données techniques"" au dos de ce document contient des informations sur la vitesse, le rayon de braquage, l'autonomie, la capacité de levage maximale, le poids maximal de l'utilisateur, etc.

Eloflex est testé et approuvé conformément à la norme EN12184:2014 - Classe B (utilisation intérieure et extérieure). Eloflex est également approuvé selon ISO-7176, IEC60601, et les batteries sont approuvées selon UN38.3.

Les fauteuils roulants électriques Eloflex répondent aux exigences applicables du MDR 2017/745.

L'évaluation de la conformité MDR classe 1/le marquage CE a été délivré conformément à l'annexe VIII chapitre III du MDR 2017/745. Procédure d'évaluation de la conformité : Annexe II et annexe III du MDR 2017/745. Le marquage CE sera annulé si vous utilisez des composants ou des accessoires de remplacement qui n'ont pas été approuvés pour ce produit.

Besoins

Le but d'un fauteuil roulant électrique Eloflex est de compenser une blessure ou un handicap, et il est recommandé dans les circonstances suivantes :

- Si l'utilisateur est incapable de marcher ou a une capacité de marche très limitée, ce qui rend difficile les déplacements à l'intérieur de son domicile.
- S'il est nécessaire de quitter le domicile pour sortir ou se rendre dans des lieux régulièrement fréquentés pour les besoins de la vie quotidienne.
- Lorsque l'utilisateur a des difficultés à atteindre ou à effectuer son travail ou ses activités en raison d'un handicap moteur.
- Il est conseillé d'utiliser les fauteuils roulants électriques Eloflex à l'intérieur et à l'extérieur s'il n'est pas possible d'utiliser des fauteuils roulants manuels en raison de problèmes de mobilité, mais qu'il est encore possible de manipuler correctement les fauteuils roulants électriques.

Accessoires

Le chargeur, les réflecteurs et un sac contenant des outils simples sont fournis dans le sac de rangement sous le siège lors de la livraison.

Utilité

N'utilisez le fauteuil roulant électrique Eloflex que lorsqu'il est en parfait état de marche, sinon vous vous mettez en danger et vous mettez en danger les autres. La liste suivante n'inclut pas toutes les situations possibles mais décrit certaines conditions qui peuvent affecter l'utilisabilité du fauteuil roulant électrique :

- Ne pas utiliser le fauteuil roulant électrique si les batteries sont défectueuses ou déformées.
- Ne pas utiliser le fauteuil roulant électrique si le moteur est saccadé ou émet des bruits anormaux.
- N'utilisez pas le fauteuil roulant électrique si la fonction de freinage semble défectueuse.
- Si vos pneus sont usés, contactez votre centre d'assistance ou votre revendeur.
- Si vous constatez des dommages au niveau de la ceinture de sécurité, de l'accoudoir, de l'assise, du dossier, du joystick ou d'autres parties du fauteuil, contactez votre centre d'assistance ou votre revendeur.
- Si vous constatez des dommages au système électrique (câbles, batteries, chargeurs, etc.), contactez votre centre d'assistance ou votre revendeur.

Garantie du fabricant

La garantie Eloflex couvre le remplacement des pièces cassées, à condition que le dommage ne soit pas causé par l'utilisateur. La garantie ne couvre pas les dommages résultant de circonstances extérieures telles que le vol, l'abus, la mauvaise utilisation, la foudre ou la modification.

Durée de vie

La durée de vie estimée d'un Eloflex est de 5 ans. Toutefois, la durée de vie du produit est fortement influencée par la manière dont il est utilisé et entretenu. Un Eloflex peut durer beaucoup plus longtemps s'il est bien entretenu et utilisé conformément aux informations fournies dans ce document.

Règles de sécurité et risques

L'UTILISATEUR DOIT LIRE LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET DE CONDUITE CONTENUES DANS CE DOCUMENT AVANT D'UTILISER LES FAUTEUILS ROULANTS ELOFLEX.

DÉPLIAGE ET PLIAGE


1. Placez la chaise pliée sur le sol comme indiqué ci-dessous. Déverrouillez le verrou de transport

situé à l'arrière. Tenez le dossier et tirez-le vers le haut pour ouvrir la chaise. Avec l'autre main, poussez

l'assise vers le bas jusqu'à entendre un "clic" clair, ce qui indique que le verrou est enclenché.



2. **Important !** Assurez-vous que le loquet de verrouillage est complètement fermé pour sécuriser le fauteuil dans sa position dépliée.


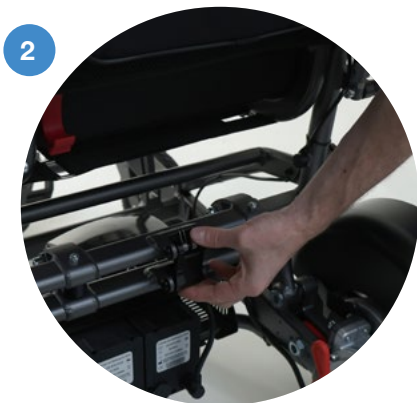


Vérifiez le verrouillage avant utilisation.

1. Étape 1 Appuyez sur le bouton rouge pour libérer le verrou principal, comme indiqué sur l'image.


2. Placez une main sur l'avant du coussin d'assise. De l'autre main, saisissez le haut du dossier et pliez-le vers l'avant. Poussez la chaise comme indiqué sur l'image. **Points de pincement !** Soyez prudent lorsque vous pliez la chaise.

3. Un verrou de transport pratique peut être engagé pour aider à maintenir le fauteuil roulant en position pliée. Tournez le verrou de transport jusqu'à ce qu'il bloque la tige opposée.

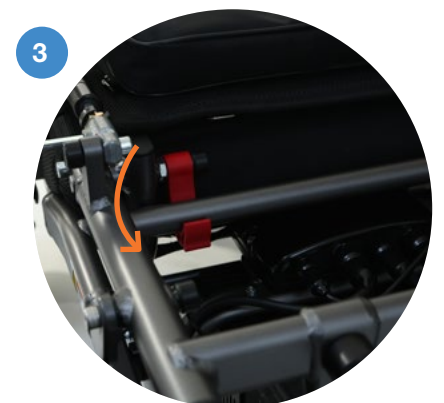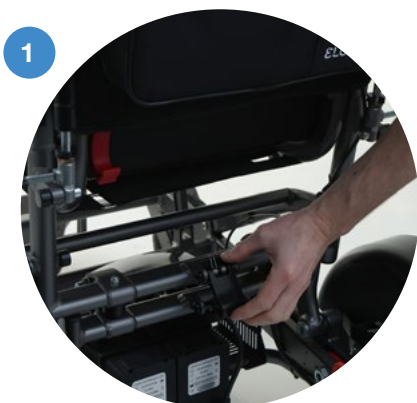


DÉSSASSEMBLER

1. Assurez-vous que la chaise est complètement pliée et que les accoudoirs sont abaissés. Relevez les dispositifs anti-basculement vers le haut. Relevez ensuite la chaise en position verticale.
2. Appuyez sur le levier rouge pour libérer le mécanisme de verrouillage.
3. Soulevez la partie supérieure bien droit vers le haut jusqu'à ce qu'elle puisse être complètement séparée. Comme les pièces sont lourdes et peuvent basculer, manipuler avec précaution lorsqu'elles sont séparées en position verticale.

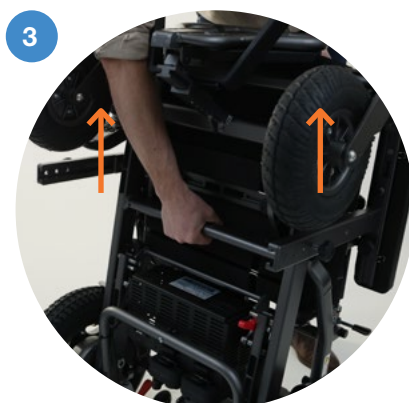

ASSEMBLAGE

1. Soulevez la partie supérieure et positionnez-la correctement à l'aide des rails de guidage sur la partie inférieure. Le mécanisme de verrouillage s'engage automatiquement, un clic se fait entendre, et le connecteur est branché lorsque la partie supérieure est complètement en place.
2. **Attention :** Après le remontage, vérifiez le mécanisme de verrouillage pour vous assurer qu'il est correctement engagé avant utilisation.
3. Dépliez à nouveau la chaise. Assurez-vous que le crochet de verrouillage est fermé avant de démarrer le fauteuil roulant électrique et de l'utiliser.

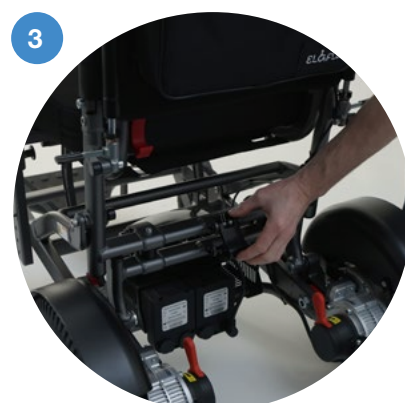

CHARGEMENT

Avant de commencer

- Chargez votre Eloflex dès sa livraison.
- N'utilisez que le chargeur d'origine fourni avec votre Eloflex.
- Le chargeur est conçu pour être connecté au joystick uniquement, et non directement aux batteries.
- Chargez au moins tous les 3 mois pour éviter d'endommager la batterie de façon permanente.

Comment charger

Chargez votre Eloflex après chaque sortie ou lorsque l'indicateur de batterie sur le joystick descend de trois lignes.

Commencez par éteindre votre Eloflex (toutes les lumières du joystick doivent être éteintes).

Branchez le chargeur sur la prise située à l'avant du joystick. Veillez à ce que les

contacts correspondent.

Branchez le câble d'alimentation du chargeur sur une prise murale. Le chargement est indiqué par un voyant sur le chargeur. Un voyant rouge indique que la charge est en cours.

Après environ trois heures, les batteries sont chargées à 90 % et le fauteuil peut être utilisé.

Au bout de 5 à 8 heures, le voyant du chargeur devient vert, indiquant que les batteries sont entièrement chargées. Pendant la charge, le chargeur chauffe, ce qui est normal.

Débranchez toujours le chargeur de la prise murale et du fauteuil lorsque la charge est terminée. Ne jamais charger sans surveillance. Les batteries peuvent être chargées jusqu'à 0 degré. En cas de charge à des températures inférieures,

les batteries peuvent ne pas se charger complètement.

Si votre Eloflex est utilisé à des températures inférieures à zéro, l'autonomie est affectée. Par exemple, à -10 degrés, l'autonomie peut être réduite de 50 %.

Stockage à long terme

Les batteries peuvent être endommagées de façon permanente si la tension descend trop bas.

Nous recommandons de déconnecter les batteries pour minimiser la décharge et de les recharger régulièrement (au moins une fois tous les trois mois).

Ne laissez jamais le chargeur branché en permanence.



Le fait de ne pas recharger régulièrement les batteries les endommagera de manière permanente


INSTALLER LE JOYSTICK

1. Montez le joystick en assemblant le verrou rapide sur l'accoudoir avec le loquet (A) orienté vers l'extérieur. Réglez l'écrou (B) afin que le loquet puisse se fermer complètement et

maintenir le joystick en place de manière sécurisée. Le joystick peut être monté à droite ou à gauche en utilisant un adaptateur disponible séparément.

2. Connectez les connecteurs de câble ensemble et tordez-les avec précaution jusqu'à ce que les broches s'insèrent dans les trous et que les rainures des deux connecteurs s'emboîtent. Ensuite, vissez fermement les manchons sur chaque point de connexion.



 **Veillez à ne pas endommager ou plier les broches du connecteur.**

RABATTRE LE JOYSTICK

Le support de joystick intelligent permet à l'utilisateur d'abaisser rapidement le joystick sans le retirer. Cela permet de se rapprocher du bord de la table, ce qui offre une meilleure position assise.

1. Soulevez le levier de verrouillage pour libérer le joystick.

2. Tirez doucement le joystick vers l'avant. Puis laissez le joystick pendre droit vers le bas.



UTILISATION DU JOYSTICK

1. L'écran LCD

2. Boutons multifonctions

3. Connecteur USB

CONSEIL : Utilisez le connecteur USB situé sous le joystick pour charger votre téléphone portable.

4. Entrée du chargeur

5. Lumière

6. Compteur de vitesse

Affiche la vitesse actuelle.

7. Réglage de la vitesse

Affiche la distance parcourue et la vitesse actuelle.

8. Compteur Trip/ODO

Il affiche la distance parcourue depuis

la dernière mise sous tension (trip) ou la distance totale du véhicule (ODO).

9. Niveau de batterie

Indique l'énergie restante dans les batteries. Lorsqu'elles sont complètement chargées, toutes les barres sont blanches. Il est recommandé de recharger la batterie lorsque trois barres ont été utilisées.




Manette

Contrôle la vitesse et la direction du fauteuil.



Klaxon

Appuyez sur cette touche pour émettre un signal d'alerte.

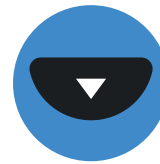

Réduire la vitesse

Appuyer pour ralentir le fauteuil.



Marche et arrêt

Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre votre Eloflex.



Augmenter la vitesse

Appuyer sur cette touche pour accélérer la vitesse du fauteuil.



Allumer/éteindre la lumière



Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre la lumière.

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Réglage des paramètres

Vous pouvez modifier les paramètres du fauteuil, notamment la langue, le volume du klaxon et les unités de mesure.

1. Pour accéder aux réglages, appuyez sur le bouton multifonction droit. Une liste d'options s'affiche.
2. Utilisez les boutons de vitesse pour faire défiler la liste des options vers le haut ou vers le bas.
3. Sélectionnez une fonction en appuyant sur le bouton multifonction droit (Enter), ou revenez en arrière en appuyant sur le bouton multifonction gauche (Return).

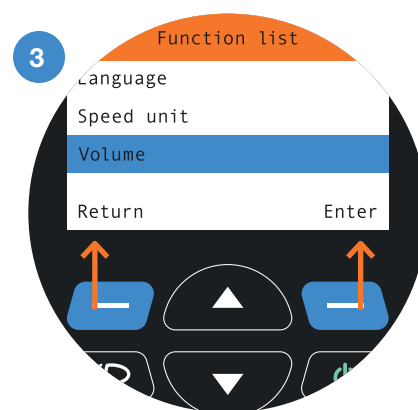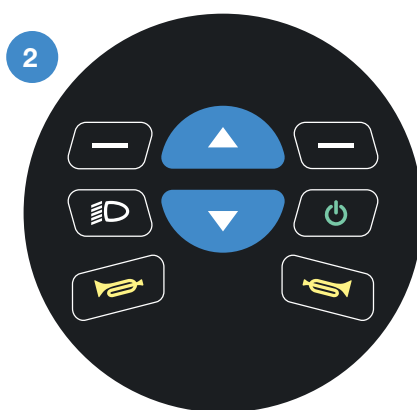

Verrouillage / Sécurité enfants

Vous pouvez verrouiller électroniquement votre Eloflex en appuyant simultanément sur les flèches haut et bas pendant 3 secondes. Un petit symbole en haut de l'écran indiquera que le verrouillage est activé. (Le joystick doit être sous tension pour verrouiller/déverrouiller).

Port de charge USB

Le port USB permet de recharger les téléphones portables, les iPads et

d'autres appareils portables. Il fournit une alimentation de 5 V avec un courant de charge déterminé par l'appareil connecté, jusqu'à un maximum de 2,1 A.

Avertissements

L'écran peut afficher des codes de défaut pour indiquer les erreurs. Les codes d'erreur 1 et 2 indiquent que les freins magnétiques sont actifs.

Commande à distance via l'application


Le fauteuil roulant Eloflex peut être commandé via une appli. Utilisez les codes QR ci-dessous pour la télécharger. Contactez votre concessionnaire pour obtenir des instructions détaillées si nécessaire. REMARQUE : la commande par appli ne doit pas être utilisée comme dispositif de commande assistant (par exemple, lorsqu'une personne est assise dans le fauteuil).



REPOSE-PIEDS

Repliez le repose-pieds


Pour faciliter l'entrée et la sortie du véhicule, le repose-pieds peut être replié vers le haut et vers l'intérieur, comme indiqué ci-dessous.

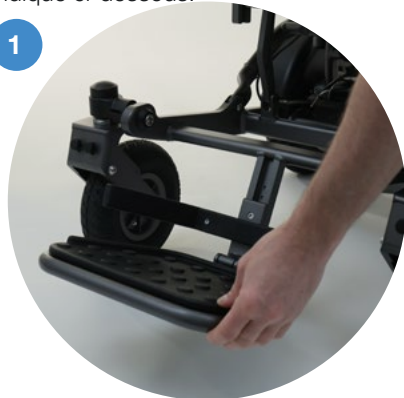

Ajuster le repose-pieds

Vous pouvez régler la hauteur du repose-pieds sur deux positions fixes.

1. Serrez les vis de fixation **(A)** tout en tenant l'écrou.
2. Retirez le couvercle en plastique noir des écrous.
3. Refixez le repose-pieds dans le trou de montage alternatif. Si le repose-pieds ne reste pas en position relevée, vous pouvez ajuster la tension en serrant les vis de fixation **(B)**.

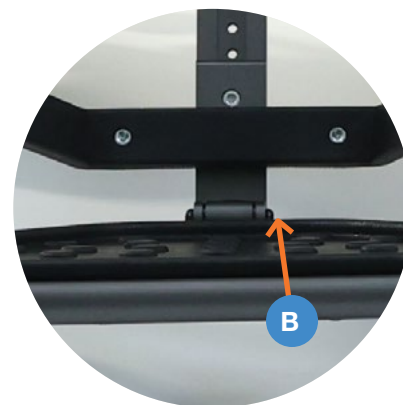

Remarque : Montez le support de mollet, s'il n'est pas déjà installé, en fixant le support fourni au pilier central avec une vis. Fixez ensuite le support de mollet au support avec deux vis.


ACCOUDOIRS

Réglez les accoudoirs.

Réglez la hauteur sur l'une des trois positions en desserrant d'abord la vis de fixation (A), puis en tirant le loquet intérieur (B). Après le réglage, resserrez la vis pour éviter les vibrations.

L'accoudoir a deux positions rabattues, une presque complètement abaissée pour le pliage et le transport, et une complètement alignée avec le siège pour une entrée et une sortie plus faciles. Réglez la largeur avec la vis (C).

Réglez l'accoudoir horizontalement (vers l'avant ou vers l'arrière) en appuyant sur le petit bouton sous l'accoudoir (D) et en faisant glisser le coussin. Relâchez le bouton pour le verrouiller en place.

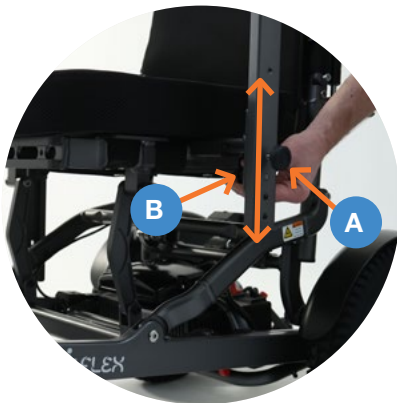

DOSSIER

Inclinez le dossier

Pour changer facilement l'angle du dossier, appuyez sur les leviers des deux côtés. Inclinez le dossier dans une position confortable, puis relâchez les leviers pour le verrouiller en place.


Réglez la hauteur.

La hauteur du dossier est réglée en desserrant les vis (A). En position haute, le haut du dossier peut être utilisé comme poignée pour transporter la chaise pliée.



RÉGLAGE DU DOSSIER

Tirez sur la garniture arrière pour la replier.
Serrez les bandes Velcro pour obtenir
une position assise confortable. Ensuite,
repliez la garniture vers le bas et appuyez
légèrement pour la fixer aux bandes
Velcro.

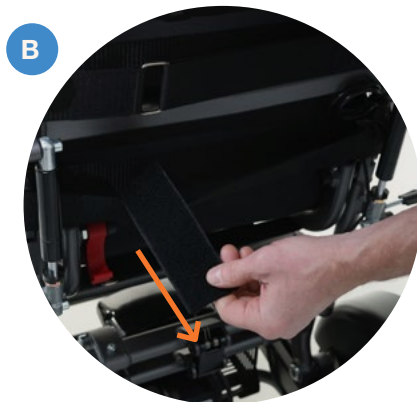



DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT

Le dispositif anti-basculé n'a pas besoin d'être réglé mais peut être rétracté pour le transport sur certains modèles. Le fauteuil roulant ne doit pas être utilisé sans le dispositif anti-basculé actif, car il existe un risque de blessure grave. Vérifiez-le avant chaque utilisation.



RISQUE DE BLESSURE
! Assurez-vous toujours que les dispositifs anti-basculé sont actifs.

CONDUITE MANUELLE

Mettez le fauteuil roulant électrique hors tension à l'aide du joystick. Poussez ensuite les leviers rouges sur les moteurs (voir image) pour déconnecter les freins magnétiques. Dans cette position, le fauteuil peut être conduit manuellement.

Remarque ! Si l'utilisateur utilise le fauteuil sans assistance, le blocage magnétique du fauteuil doit toujours être activé.



Ne poussez pas les leviers rouges avec votre pied ; utilisez uniquement vos mains.

CEINTURE DE SÉCURITÉ

Pour une conduite en toute sécurité, nous recommandons de toujours utiliser la ceinture de sécurité lorsque vous utilisez le fauteuil.



TRANSPORT ET STOCKAGE

- Pour soulever la chaise, il est recommandé de la plier d'abord à plat, puis de la mettre en position verticale avant de la soulever.
- Un fauteuil plié peut être mis dans le coffre d'une voiture ou rangé dans une armoire.
- Rabattez ou enlevez le joystick pendant le transport.
- Si le fauteuil n'est pas utilisé pendant un certain temps, veillez à ce qu'il soit correctement rangé et que les batteries soient régulièrement rechargées conformément au chapitre "Comment recharger". Sinon, le fauteuil risque de devenir inutilisable.
- Le fauteuil doit être stocké à l'intérieur, à l'abri du gel, dans un endroit sec et ventilé. La température de stockage doit être comprise entre 0 et 30 degrés.
- Les housses de coussin sont amovibles et lavables à 40°C.
- Lors du transport par bus ou transport pour personnes handicapées, l'Eloflex doit être fixé aux points d'ancrage (1-4) indiqués sur les images ci-dessous. Remarque : l'Eloflex n'est pas testé ni approuvé comme siège auto. Il n'est donc pas autorisé de s'asseoir dans l'Eloflex pendant le transport en voiture.
- En cas de transport par avion, veuillez vous renseigner auprès de votre compagnie aérienne avant la réservation et l'enregistrement. Eloflex suit les recommandations de l'IATA.



CONDUITE

Lire

L'utilisateur doit lire ces instructions de sécurité et de conduite avant d'utiliser le fauteuil roulant électrique Eloflex.

Pratiquer

C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Entraînez-vous à conduire votre Eloflex avec un assistant en commençant sur une surface ouverte, de préférence à l'extérieur, avant d'utiliser votre fauteuil roulant électrique parmi d'autres personnes, dans des magasins ou des restaurants, etc. Avancez en déplaçant lentement le joystick vers l'avant. Arrêtez-vous en relâchant le joystick.

Reculer

Reculer en déplaçant lentement le joystick vers l'arrière. Pour vous arrêter, relâchez le joystick. N'oubliez pas de toujours regarder en arrière avant de commencer à reculer pour vous assurer qu'aucune personne ou chose ne se trouve sur le chemin.

Spinn

Tournez en déplaçant doucement le joystick sur le côté. Veillez à ce que rien ne gêne les côtés lorsque vous tournez.

Tourner

Tournez pendant que vous conduisez en déplaçant doucement le joystick latéralement dans la direction où vous voulez tourner. Réduisez toujours la vitesse lorsque vous tournez.

Obstacle

Entraînez-vous à éviter et à passer les obstacles. Déplacez le joystick

latéralement tout en avançant pour éviter les obstacles. N'oubliez pas de réduire la vitesse à l'approche des obstacles.

Conduite rapide

Conduite rapide : Appuyez sur le joystick en position avant si vous voulez rouler vite. N'oubliez pas de rétracter le joystick et de réduire la vitesse dès que vous vous sentez en danger, qu'il s'agisse de que vous tourniez ou que vous approchiez d'un obstacle

Franchir des obstacles

Conduisez lentement jusqu'à l'obstacle et assurez-vous que les roues avant sont dans le sens de la marche. Eloflex a été testé et approuvé pour franchir des obstacles d'une hauteur maximale de 6 cm.

Surfaces en pente

Essayez de conduire en ligne droite vers le haut ou vers le bas sur une surface inclinée. Penchez-vous légèrement vers l'avant lorsque vous montez et vers l'arrière lorsque vous descendez, afin de maintenir le centre de gravité. Évitez de rouler sur le côté si possible et compensez toute pente latérale en vous penchant dans la direction opposée. Conduisez toujours lentement sur les pentes et notez que la distance d'arrêt peut être considérablement plus grande que sur un terrain plat. L'angle d'inclinaison maximal autorisé pour ce fauteuil roulant est de 9 degrés. Même si votre Eloflex en est capable, évitez de conduire dans des pentes supérieures à l'angle d'essai requis en raison du

risque de blessures graves en cas de basculement.

Ascenseurs

N'oubliez pas de vérifier la largeur de la porte de l'ascenseur et la rapidité avec laquelle la porte se ferme avant d'entrer dans l'ascenseur. N'oubliez pas que vous devrez peut-être faire marche arrière pour sortir de l'ascenseur si celui-ci n'est pas assez large pour vous permettre de faire demi-tour.

Conduite sur route

Conduisez principalement sur les trottoirs, les allées piétonnes et les pistes cyclables.

Traverser la chaussée

Si possible, choisissez toujours de traverser la route à un passage pour piétons. Faites attention aux voitures qui se croisent. Utilisez la partie chanfreinée de la chaussée si elle est disponible. Évitez les bordures de plus de 6 cm de haut.

Pneus

Si le fauteuil roulant est équipé de pneus gonflés à l'air, vérifiez régulièrement la pression à 2,5 bars. En cas de crevaison, ne continuez pas à rouler et contactez votre revendeur ou un atelier de réparation approprié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LA CONDUITE

Le basculement du fauteuil roulant peut entraîner des blessures graves.

- Ne conduisez que dans des pentes qui ne dépassent pas l'angle maximal spécifié.
- Utilisez toujours des anti-basculateurs lorsque vous vous déplacez avec Eloflex
- Les descentes doivent toujours être effectuées à vitesse réduite.
- Évitez les zones où il y a un risque de surfaces glacées ou glissantes.
- N'essayez jamais de monter ou de descendre des escaliers avec votre fauteuil roulant électrique.
- Ne jamais franchir d'obstacles d'une hauteur supérieure à la hauteur maximale recommandée
- Évitez les mouvements rapides avec le joystick et les changements soudains de direction pendant la conduite.

Risque d'être bloqué dans des endroits isolés.

- Un utilisateur à mobilité fortement réduite ne doit pas parcourir seul de longues distances à l'extérieur.

Risque de blessure si un pied glisse du repose-pied et tombe sous le fauteuil roulant électrique pendant la conduite.

- Placez toujours vos pieds au milieu du repose-pieds lorsque vous conduisez.

Risque de blessure en cas de collision avec d'autres objets.

- Conduisez dans les passages étroits à la vitesse la plus basse et avec la plus grande attention.
- Faites très attention lorsque vous vous approchez ou conduisez à proximité de tables en raison du risque de pincement entre le plateau de la table et le joystick et/ou l'accoudeur.

Le fauteuil roulant risque de basculer si les dispositifs antibasculement sont retirés, endommagés ou montés dans une position différente du montage standard.

- Les dispositifs anti-basculement doivent toujours être montés lorsque le fauteuil roulant électrique est utilisé
- Les dispositifs anti-basculement ne fonctionnent que sur une surface solide. Sur des surfaces

molles telles que les pelouses et la neige, le dispositif anti-basculer peut perdre son effet. Par conséquent, conduisez très prudemment sur des surfaces molles.

Fibre de carbone

Pour nos modèles en fibre de carbone, veuillez noter ce qui suit : Ce matériau présente un excellent rapport résistance/poids, ce qui permet un poids total réduit. Cependant, ce matériau est également plus fragile que d'autres matériaux tels que l'aluminium et est plus susceptible de se fissurer ou d'être perforé. Par conséquent, un produit en fibre de carbone doit en général être manipulé avec plus de précaution que les autres produits, et cela s'applique également à votre fauteuil roulant Eloflex.



SÉCURITÉ

Traverser les voies ferrées

Traversez toujours la voie ferrée de face, jamais de biais. Ne traversez jamais les voies ferrées seul, soyez toujours accompagné d'une personne qui peut vous aider.

Arêtes vives

Soyez prudent lorsque vous conduisez sur des pentes raides, car le fauteuil risque de se briser. Eloflex est testé et approuvé pour des pentes de 9 degrés maximum. Soyez toujours accompagné d'une personne qui peut vous aider.

Bords hauts

Soyez prudent lorsque vous montez ou descendez une arête. Eloflex est testé et approuvé pour des bords d'un maximum de 6 cm. Soyez toujours accompagné d'une personne qui peut vous aider.

Transfert

Nous vous recommandons d'être toujours accompagné d'une personne qui peut vous aider lors des transferts vers et depuis votre Eloflex. Coupez toujours l'alimentation électrique avant de commencer le mouvement. Soulevez toujours les accoudeurs et le repose-pieds avant de vous déplacer pour faciliter l'entrée et la sortie du fauteuil.

Ne réparez pas vous-même

N'essayez jamais de réparer vous-même un fauteuil roulant électrique cassé. Si vous essayez de réparer le fauteuil vous-même, la garantie ne s'applique pas. Adressez-vous toujours à Eloflex ou au magasin ou centre d'assistance qui a vendu / prescrit le fauteuil.

Ne modifiez jamais votre fauteuil roulant électrique par vous-même.

Pas de jouet

Ne laissez jamais des enfants qui n'utilisent pas normalement un fauteuil roulant électrique s'asseoir sur votre Eloflex ou l'utiliser.

Nettoyage

Ne nettoyez jamais votre Eloflex à l'eau courante. Essuyez-le uniquement avec un chiffon humide. Si votre Eloflex est lent à se replier, vous pouvez lubrifier les articulations avec de l'huile ou un spray de silicone.

Attention à la chaleur

Ne laissez jamais votre Eloflex en plein soleil, près d'une source de chaleur ou d'un feu ouvert. Les piles peuvent être endommagées et certaines surfaces peuvent devenir tellement chaudes qu'il y a un risque de blessure. Vous pouvez utiliser votre Eloflex de -10 degrés à +45 degrés. A basse température, l'autonomie de conduite est affectée. Le fauteuil roulant est résistant à l'inflammation conformément à la norme EN 12184.

Stockage

Gardez votre Eloflex hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé. Le fauteuil doit être stocké à l'intérieur, à l'abri du gel, dans un endroit sec et ventilé. Température de stockage : 0-30°C.

Le chargeur

Le chargeur ne doit jamais être couvert lorsqu'il est utilisé pour charger votre Eloflex. Le chargeur

devient chaud et il y a un risque d'accident ou de blessure.

Les batteries

Ne stockez jamais les batteries à la lumière directe du soleil ou dans un endroit où la température peut descendre en dessous de zéro. Les piles doivent être stockées dans un endroit sec et ventilé. En cas de mise au rebut, les piles doivent être recyclées conformément aux exigences nationales/locales. Veuillez noter que, comme pour tous les produits alimentés par des piles, l'autonomie diminue avec le temps, y compris pendant la période de garantie et la durée de vie du produit.

Utilisation

Le fauteuil roulant électrique Eloflex est conçu pour répondre à différents besoins. La décision concernant son adéquation à l'utilisateur est prise conjointement par le coordinateur ou le revendeur et l'utilisateur. Eloflex ne peut être tenu responsable si le fauteuil roulant électrique n'est pas adapté aux besoins de l'utilisateur.

Modifications

Votre Eloflex doit avant tout être utilisé dans sa configuration standard. Toute modification ou adaptation ne peut être effectuée que par votre centre de service agréé ou par Eloflex. Veuillez noter que les dommages ou dysfonctionnements causés par des modifications non conformes au mode d'emploi ou par un entretien insuffisant ne sont pas couverts par la garantie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Il existe un risque de blessure si le fauteuil roulant électrique est utilisé à d'autres fins que celles décrites dans le présent document.

- N'utilisez le fauteuil roulant électrique que conformément aux instructions du présent manuel (voir ci-dessus le chapitre "Classification du type et utilisation prévue").
- Ne jamais utiliser (être assis dans) le fauteuil roulant lorsqu'il est transporté dans un autre véhicule (voiture/bus).

Il y a un risque de blessure si le fauteuil roulant électrique est utilisé en cas de capacité de conduite réduite.

- N'utilisez pas le fauteuil roulant lorsque vos capacités de conduite sont diminuées, par exemple en raison d'une maladie, de la prise de médicaments ou de l'alcool.

Il existe un risque de blessure si le fauteuil roulant électrique est déplacé involontairement.

- Éteignez le fauteuil roulant avant de monter et de descendre ou s'il y a un risque que vous, une autre personne ou un objet entre en contact avec le joystick.
- Lorsque les moteurs sont débrayés, les freins ne fonctionnent pas. Par conséquent, le fauteuil roulant ne doit être poussé que sur un terrain plat, jamais sur une pente. Ne laissez jamais le fauteuil roulant dans ou à proximité d'une pente lorsque les moteurs sont débrayés.

Il existe un risque de blessure si le fauteuil roulant électrique est arrêté en cours de route, par exemple à l'aide du bouton marche/arrêt

ou en arrachant un câble, car il s'arrête d'un coup sec.

- Relâchez le joystick lors d'un freinage d'urgence. Le fauteuil roulant s'arrête alors automatiquement.

Il existe un risque de blessure en cas de chute du fauteuil roulant

- Ne vous déplacez pas vers l'avant, ne vous penchez pas vers l'avant entre les genoux et ne vous penchez pas sur le bord du fauteuil roulant, par exemple pour atteindre des objets.
- Il est recommandé de toujours utiliser la ceinture de sécurité et de la réajuster avant chaque déplacement.
- Lors d'un transfert entre sièges/véhicules, conduisez le plus près possible de la nouvelle position afin de minimiser l'écart et le risque de basculement du fauteuil roulant.

Il existe un risque de blessure en cas de dépassement de la charge maximale autorisée.

- Respectez la charge maximale autorisée (voir le chapitre "Caractéristiques techniques" au dos de ce document).
- Le fauteuil roulant électrique ne peut être utilisé que par une seule personne. Ne jamais utiliser le fauteuil roulant pour transporter plus d'une personne à la fois.

Il existe un risque de blessures et de dommages au fauteuil roulant si la serrure se débloque lorsque le pliage n'est pas correctement serré lors de l'utilisation du fauteuil roulant électrique.

- Si le verrou du fauteuil roulant électrique n'est pas correctement enclenché, le fauteuil peut s'affaisser soudainement lors de l'utilisation, ce qui peut vous faire tomber du fauteuil.
- Assurez-vous toujours que le crochet de verrouillage est correctement positionné avant d'utiliser le fauteuil roulant électrique.
- Le pliage du fauteuil roulant présente un risque de blessure et d'écrasement.
- Pliez et relevez toujours le fauteuil roulant électrique comme décrit dans le mode d'emploi.
- Veillez à ce que rien ne soit écrasé lors du pliage et du dépliage.

L'utilisation du fauteuil roulant dans des endroits humides présente un risque de blessure et d'endommagement.

- Le fauteuil roulant électrique ne doit pas être utilisé en cas de chute de neige.
- Le fauteuil roulant électrique ne doit pas être utilisé lors d'un bain.
- Évitez de conduire sous la pluie pendant de longues périodes.

CEM

- Il existe un risque que le fauteuil roulant perturbe ou soit perturbé par des équipements en raison de champs électromagnétiques. Cela peut affecter les commandes du fauteuil roulant.
- Cet appareil est équipé d'un transmetteur Bluetooth. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES H2

POIDS NET Sans piles	19 + 23 kg	INCLINAISON MAX. Statique / dynamique	9° / 6°
POIDS TOTAL Avec les batteries	46 kg	OBSTACLE MAXIMAL	5 cm
VITESSE	6,5 km/h	ROUES 2,5 bars	Avant 9" (gonflables) Arrière 13" (gonflables)
AUTONOMIE	30 km*	SIÈGE H x L x P	58 x 48-60 x 47
DURÉE Par charge	5 h	POIDS MAX. DE L'UTILISATEUR	190 kg
MOTEUR	x 2 moteur haute puissance brushless	JOYSTICK	Monté à droite ou à gauche
PUISSANCE DU MOTEUR	2 x 350 W	COUSSIN	Housse déhoussable et amovible
BATTERIE	2 x lithium-ion 10 Ah / 24 V (240 Wh)	DOSSIER	Angle réglable de 8-30°
POIDS DE LA BATTERIE	1,8 kg	TAILLE H x B x T	102-112 x 65 x 125 cm
TEMPS DE CHARGE	3 h	TAILLE PLIÉE H x L x P	54 x 65 x 98 (93**) cm
RAYON DE BRAQUAGE	94 cm	GARANTIE	2 ans

* Distance dans des conditions optimales, en fonction de la température, du style de conduite, de l'altitude, de l'état de la batterie, etc. Pour une plus grande autonomie et/ou une capacité de charge plus élevée, nous recommandons l'utilisation de trois batteries.

** Support pour mollet retiré.

© Copyright Eloflex

Ce document contient des informations protégées par le droit d'auteur et ne peut être copié ou reproduit, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite d'Eloflex. Eloflex décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d'impression dans ce document et se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits.

Contactez Eloflex

Si vous avez des questions, besoin d'aide ou souhaitez obtenir des informations sur les rappels de produits ou les consignes de sécurité, veuillez contacter votre centre d'assistance ou votre revendeur local. Si nécessaire, vous trouverez le numéro de série du produit sur une étiquette située sous le boîtier.

